

Información del Producto y del Fabricante

Contenido: 1 – Electrodo de Cloro Cl⁻ no rellenable.
2 – Conectores para electrodos.

Uso intencionado: Use Con los analizadores de Electrolitos Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL Ilyte y Menarini

Almacenamiento: Mantener el Electrodo de Cloro Cl⁻ en temperatura ambiental (18-25C) hasta el momento de su utilización

Precauciones: Por favor verifique que no hay burbujas en la cámara del electrodo, especialmente cerca del área del conducto de la membrana de medición. Si se detecta ruido, desvío ó errores en los valores de rango mV, se recomienda usar la solución de limpieza diaria.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Para obtener asistencia tecnica, por favor llamar al número telefónico: 1-508-429-0450

Instalación

- 1 Retire la cinta Kapton de ambos lados del electrodo.
- 2 Asegure los conectores de los electrodos.
- 3 Instale el electrodo en su sistema.
- 4 Permita que el electrodo ejecute su propio equilibramiento por lo menos durante 15 minutos.
- 5 Ejecute una calibración a 2-puntos.
- 6 Analice una muestra del control de calidad.

Garantía

La Garantía se calcula 6 meses a partir de la fecha que sale el envío de nuestras oficinas de Holliston, MA.

