

Información del Producto y del Fabricante

Contenido: 1 – Electrodo de Potasio K⁺ no rellenable.
2 – Conectores para electrodos.

Uso intencionado: Con los analizadores Ciba Corning, Chiron y Bayer Diagnostics: serie 200 y 800, 634 y el Gasómetro y Analizador de Iones 348.

Almacenamiento: Mantener el Electrodo de Potasio en temperatura ambiental (18-25C) hasta el momento de su utilización.

Precauciones: Por favor revise que el cuerpo del electrodo esté lleno $\frac{3}{4}$ partes con la Solución de Llenado antes de la instalación y que no existan burbujas en la cámara del electrodo, especialmente cerca del área del conducto de la membrana de medición.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Para obtener asistencia técnica, por favor llamar al número telefónico: 1-508-429-0450

Instalación

- 1 Retire la cinta Kapton de ambos lados del electrodo.
- 2 Asegure los conectores de los electrodos.
- 3 Instale el electrodo en su sistema.
- 4 Permita que el electrodo ejecute su propio equilibramiento por lo menos durante 15 minutos.
- 5 Ejecute una calibración a 2-puntos.
- 6 Analize una muestra del control de calidad.

Garantía

La Garantía se calcula 6 meses a partir de la fecha que sale el envío de nuestras oficinas de Holliston, MA.

