

Información del Producto y del Fabricante

Contents: 1 – Electrodo de Sodio Na⁺ no rellenable.
2 – Conectores para electrodos

Uso intencionado: Use Con los analizadores de Electrolitos Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILyte y Menarini

Almacenamiento: Mantener el Electrodo de Sodio Na⁺ en temperatura ambiental (18-25C) hasta el momento de su utilización

Precauciones: Si se detecta ruido, desviación ó errores en los valores de rango mV, se recomienda usar el Enjuague de Diario.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Para obtener asistencia tecnica, por favor llamar al número telefónico: 1-508-429-0450

Instalación

- 1 Retire la cinta Kapton de ambos lados del electrodo.
- 2 Asegure los conectores de los electrodos.
- 3 Instale el electrodo en su sistema.
- 4 Permita que el electrodo ejecute su propio equilibramiento por lo menos durante 15 minutos.
- 5 Ejecute una calibración a 2-puntos.
- 6 Analize una muestra del control de calidad.

Warranty

Warranty is calculated 12 months from the date of shipment from Holliston, MA.

